

Swing-X (Flow X), Stannah Siena eller Bespoke Infinity – hvilken stolelift passer bedst til brugeren og trappen?

En kildebaseret sammenligning med fokus på sikkerhed, brugervenlighed og individuelle behov

Når man sammenligner stolelifte, er pris og udseende kun en del af beslutningen. Det vigtigste er, om liften passer til brugeren, funktionsnedsættelsen og den konkrete trappe – og om brugeren kan betjene liften sikkert i hverdagen.

I denne artikel sammenligner vi tre kurvede stolelifte, som tilbydes på det danske marked:

- **Swing-X**, der forhandles af **Stigus Elevator ApS**. Producentens produktnavn er **Flow X**
- **Stannah Siena**, der forhandles af **A/S A.P. Botved**
- **Bespoke Infinity Curved**, der forhandles af **Jøhl Human Care ApS**

Sammenligningen tager udgangspunkt i seks forhold: brugersikkerhed, brugervenlighed, individuel tilpasning, ergonomi, mulighed for selvredning ved driftstop og skinnens evne til at følge trappens forløb.

Åbenhed om afsender og metode Stigus Elevator ApS forhandler Swing-X, som producenten markedsfører under navnet Flow X, og har derfor en kommerciel interesse i et af de produkter, der indgår i sammenligningen. Analysen er imidlertid gennemført efter de samme seks kriterier for alle tre produkter og bygger på offentligt tilgængeligt materiale fra producenterne, herunder produktsider, brochurer og brugervejledninger. Stigus.dk har ikke ændret produktdata, udeladt dokumenterede konkurrerende funktioner eller efterfølgende redigeret konklusionerne for at stille Swing-X/Flow X mere fordelagtigt. Hvor en funktion ikke er fundet i producentens offentlige materiale, beskrives den som *ikke dokumenteret* – ikke nødvendigvis som *ikke eksisterende*.

Benchmark – samlet og overskuelig sammenligning

Benchmarkingen anvender en skala fra 1 til 5:

- **5 – særdeles stærk:** omfattende og tydeligt dokumenterede funktioner
- **4 – stærk:** gode, veldokumenterede funktioner med enkelte begrænsninger

- **3 – tilfredsstillende:** opfylder det almindelige behov, men med færre muligheder eller mindre dokumentation
- **2 – begrænset:** funktionen er kun delvist dokumenteret eller vil ofte kræve hjælp
- **1 – ikke dokumenteret:** den undersøgte funktion er ikke fundet i det offentlige producentmateriale

Alle seks kriterier vægtes lige. Maksimal score er derfor 30 point.

Benchmarkparameter	Swing-X (Flow X)	Stannah Siena/260	Bespoke Infinity
Brugersikkerhed	5	5	4
Brugervenlighed	5	5	4
Tilpasning til kropsbygning og motorik	4	5	3
Ergonomi	5	4	3
Selvredning ved driftstop	5	3	2
Skinneføring langs trinkanten	5	3	4
Samlet score	29/30	25/30	20/30

Sådan skal pointene læses

Pointene er en struktureret sammenfatning af producenterne offentlige dokumentation – ikke resultatet af en fysisk laboratorietest eller en holdbarhedstest. En lavere score betyder derfor ikke automatisk, at et produkt er usikkert eller uegnet. Den kan også skyldes, at producenten ikke offentliggør lige så detaljerede oplysninger om den pågældende funktion.

Benchmarkingen vurderer heller ikke pris, leveringstid, støjniveau, levetid, serviceorganisation eller reparationsomkostninger. Disse forhold bør vurderes separat i det konkrete tilbud.

For en bruger med behov for fempunktssele eller særlig betjening kan Stannah eksempelvis være det bedste valg, selv om Flow X har den højeste samlede score. På samme måde kan trappens geometri eller lokale installationsforhold gøre Infinity til den mest hensigtsmæssige løsning i en konkret bolig.

1. Brugsikkerhed

Swing-X (Flow X)

Flow X har en sikkerhedssele, der kan betjenes med én hånd, omsluttende armlæn og et system, som registrerer, om sikkerhedsselen er spændt, før kørslen begynder. Liften har desuden registrering af armlænenes position og automatisk stop.

En central funktion er Advanced Swivel and Levelling, forkortet ASL. Systemet holder sædet vandret og drejer sæde og fodplade under kørslen. Det kan reducere risikoen for, at brugerens knæ eller fødder kommer tæt på væg, gelænder eller trappens indersving.

Producenten angiver en maksimal brugervægt på 125 kg og oplyser, at Flow X er konstrueret og testet efter EN 81-40:2020. [Kilde: Access BDD – Flow X](#)

Stannah Siena

Stannah Siena har sikkerhedskanter på fodplade og køreenhed. Hvis liften møder en forhindring, standser den automatisk. Den har desuden nøgleafbryder, sikkerhedssele og mulighed for manuelt eller elektrisk drejesæde, så brugeren kan stige af vendt mod reposen.

Stannah skiller sig især ud ved udvalget af seler. Producentens materiale viser mulighed for hoftese, oprullelig sele, diagonalsele og fempunktssele. Det kan være en væsentlig fordel for personer med dårlig siddestabilitet, spasticitet, ufrivillige bevægelser eller risiko for at glide frem i sædet. [Kilde: Stannah – Siena-brochure for kurvede trapper](#)

Bespoke Infinity

Infinity Curved har en justerbar sikkerhedssele, nøgleafbryder og sikkerhedssensorer på fodplade og køreenhed. Sensorerne standser liften, hvis der registreres en forhindring. Derudover har liften et digitalt display, som viser status og fejlmeddelelser.

Producentens brugervejledning beskriver også sikkerhedskontakt ved sædedrejning og systemer til registrering af overhastighed og overstrøm. Der er imidlertid ikke fundet dokumentation for en selekontrol svarende til Flow X eller det samme udvalg af kropsstøttende seler som hos Stannah. [Kilde: Bespoke Stairlifts – Infinity Curved](#)

Vurdering: Alle tre lifte har de grundlæggende funktioner, man forventer af en moderne stolelift. Flow X har den stærkeste kombination af overvågning og automatisk sædebevægelse, mens Stannah har den største fleksibilitet, når brugeren har behov for særlig kropsstøtte.

2. Brugervenlighed

Flow X

Flow X betjenes med et integreret soft-touch-joystick, som kan foldes ind i armlænet. Sikkerhedsselen kan betjenes med én hånd, og ASL-systemet sørger automatisk for sædets drejning og nivellering under kørslen. Brugeren skal derfor udføre færre manuelle handlinger.

Flow X leveres med trådløse kalde-/sendebetjeninge og kan som tilvalg få en integreret opkaldsenhed, der kan kontakte op til tre forprogrammerede telefonnumre. [Kilde: Access BDD – Flow X](#)

Stannah Siena

Sienas kontrol kan placeres i højre eller venstre side. Producenten oplyser, at den lette betjening kan aktiveres med hånd, arm eller håndled. Det er relevant ved eksempelvis gigt, tremor, nedsat fingerfunktion eller svækket gribeevne.

Der kan vælges mellem manuel og elektrisk sædedrejning samt manuel eller elektrisk sammenfoldning af fodpladen. Stannah kombinerer dermed enkel grundbetjening med et stort udvalg af individuelle betjeningsmuligheder. [Kilde: Stannah – Siena](#)

Bespoke Infinity

Infinity har en enkel vippekontakt, som kan placeres til højre eller venstre. Liften leveres med to fjernbetjeninge, og fodpladen kan løftes via et håndtag, så brugeren ikke behøver at bøje sig ned til gulvniveau. Elektrisk drejesæde kan vælges som ekstraudstyr og beskrives af producenten som egnet til personer med nedsat fingerfærdighed. [Kilde: Bespoke Stairlifts – tilvalg](#)

Vurdering: Flow X reducerer antallet af manuelle handlinger gennem automatik. Stannah tilbyder til gengæld den bredeste tilpasning af selve betjeningen. Infinity er enkel at bruge, men producenten dokumenterer færre alternative kontrolformer.

3. Tilpasning til kropsbygning og motorisk funktionsnedsættelse

Flow X

Flow X har fire sædehøjder fra 515 til 585 mm. Fodpladen fås i to størrelser og kan justeres i fem positioner. Det gør det muligt at tilpasse støtte under lår og fødder og dermed skabe en bedre stilling ved kørsel og oprejsning.

De koniske armlæn er udformet som støtte, når brugeren sætter sig eller rejser sig. Den maksimale brugervægt på 125 kg kan dog være en begrænsning for nogle brugere. [Kilde: Access BDD – tekniske specifikationer](#)

Stannah Siena

Siena findes med to sædebredder. Hertil kommer flere seletyper, højre- eller venstrebetjening, forskellige kontrolgreb samt mulighed for elektrisk fodplade og drejesæde.

Det giver gode muligheder for at tilpasse liften til både brugerens størrelse og motoriske funktion. På den kurvede model oplyser Stannah en vægtpacitet på 120–135 kg afhængigt af den konkrete konfiguration og trappens hældning. [Kilde: Stannah – Siena](#)

Bespoke Infinity

Infinity tilbyder højre- eller venstrebetjening, justerbar sikkerhedssele og elektrisk drejesæde som tilvalg. Producenten beskriver sædet som kompakt og polstret.

I det offentlige materiale er der ikke fundet tilsvarende oplysninger om flere sædebredder, justerbar sædehøjde, forskellige fodpladestørrelser eller fempunktssele. Det betyder ikke nødvendigvis, at en dansk leverandør ikke kan tilbyde yderligere tilpasninger, men de kan ikke bekræftes ud fra producentens publicerede materiale.

Vurdering: Stannah har det bredeste dokumenterede udvalg til personer med komplekse motoriske eller posturale behov. Flow X tilbyder en stærk mekanisk tilpasning af siddehøjde og fodplacering. Infinity dækker de mere grundlæggende behov.

4. Ergonomiske fordele

Flow X har et let tilbagelænet, polstret sæde, justerbar sædehøjde og fodplade samt koniske, omsluttende armlæn. Den åbne adgangsposition omkring armlænene kan gøre overflytning fra ganghjælpemiddel eller kørestol lettere. ASL-systemet holder samtidig sædet vandret gennem trappens kurver. [Kilde: Access BDD – funktioner og fordele](#)

Stannahs ergonomiske styrke ligger især i valget mellem sædebredder, de alternative betjeninger og mulighederne for elektrisk fodplade og drejesæde. Det kan mindske behovet for at bøje sig, dreje kroppen eller anvende stor håndkraft.

Infinity har polstret sæde og ryglæn, justerbar sele og et håndtag til fodpladen. Elektrisk drejesæde kan mindske den fysiske belastning ved afstigning.

Producenten offentliggør dog færre mål og indstillingsmuligheder end de to øvrige producenter.

Vurdering: Flow X har den mest omfattende dokumenterede kombination af siddeergonomi, transferstøtte og automatisk bevægelse. Stannah er særlig stærk, når ergonomien skal opnås gennem individuelle betjenings- og sædevalg.

5. Hvad sker der ved strøm- eller driftstop?

Det er vigtigt at skelne mellem strømsvigt og et egentligt driftstop. En batteridrevet stolelift kan normalt fortsætte ved svigt i boligens elforsyning, så længe batterierne er opladede. Det løser imidlertid ikke nødvendigvis et mekanisk stop eller en aktiveret sikkerhedskreds.

Flow X

Access BDD beskriver en særlig nød-sænkning, som kan aktiveres ved tryk på en knap. Sammen med den valgfrie opkaldsenhed giver det den bedst dokumenterede mulighed for, at brugeren enten kan bringe liften ned eller tilkalde hjælp fra stolen.

[Kilde: Access BDD – funktioner og fordele](#)

Nød-sænkning kan dog ikke forventes at overvinde enhver mekanisk blokering eller tilsidesætte alle sikkerhedsfunktioner.

Stannah Siena

Stannahs brugervejledning beskriver batterikørsel ved strømsvigt, en genstartsprocedure og mulighed for kontrolleret kørsel nedad. Der medfølger desuden et håndsving til manuel flytning af stolen. Som sidste udvej beskriver

vejledningen, at sædet kan drejes mod trappens øvre side, hvorefter brugeren kan stige ud opad.

Håndsvinget vil ofte kræve en hjælper, og udstigning mellem etager kan være uegnet eller farlig for den bruger, som har behov for stoleliften. Stannah anbefaler derfor også, at en bruger, der er alene, medbringer en mobiltelefon eller anden kommunikationsenhed. [Kilde: Stannah – brugervejledning for Siena 260](#)

Bespoke Infinity

Infinity har batteridrift, ladestationer og et diagnostikdisplay. Den offentlige brugervejledning instruerer brugeren i at kontakte leverandøren, hvis liften virker defekt, og understreger, at mekaniske og elektriske indgreb skal udføres af en autoriseret tekniker.

Der er ikke fundet en offentligt dokumenteret, brugerstyret nød-sænkning. Derfor bør kunden inden køb bede den danske leverandør om en konkret, skriftlig beskrivelse af evakueringsproceduren ved stop mellem etagerne. [Kilde: Bespoke Infinity – brugervejledning](#)

Vurdering: Flow X har den stærkeste dokumenterede løsning til selvredning. Stannah har flere beskrevne nødprocedurer, men nogle vil kræve hjælp. For Infinity er en egentlig brugerstyret nød-sænkning ikke dokumenteret i det gennemgåede materiale.

6. Hvor tæt kan skinnen følge trappen?

Flow X

Flow X anvender en kompakt enkeltskinne, som kan monteres på begge sider af trappen og placeres tæt på trinene. Producenten oplyser, at liften kan installeres på trapper ned til 610 mm i bredde. ASL-systemet lader sæde og fodplade dreje under kørslen, så den samlede brugerprofil kan tilpasses smalle og stejle passager. [Kilde: Access BDD – Flow X](#)

Stannah Siena

På kurvede trapper anvendes Siena sammen med en individuelt fremstillet skinneløsning. Stannahs britiske brochure beskriver en dobbeltskinne, mens den danske forhandler oplyser, at Siena kan kombineres med flere skinneløsninger. Den præcise løsning skal derfor fastlægges i tilbuddet til den konkrete trappe.

Stannah angiver en minimumsbredde på 679 mm for Siena til trapper med sving. En dobbeltskinne vil normalt fylde mere visuelt og fysisk end Flow X's enkeltskinne, men giver samtidig en stabil og gennemprøvet konstruktion. [Kilde: Stannah – Siena](#) og [A/S A.P. Botved – Siena](#)

Bespoke Infinity

Infinity-skinnen projekteres af Bespokes CAD-afdeling efter opmåling af den konkrete trappe. Producenten udarbejder installationstegning, bukkedata og placering af skinneben og ladestationer. Det giver mulighed for en individuelt fremstillet skinne, der følger sving og reposer.

Producenten offentliggør ikke på den gennemgåede produktside en minimumsbredde eller en aktiv sæderotation svarende til Flow X. Det er derfor ikke muligt alene ud fra hjemmesiden at fastslå, om Infinity kan placeres lige så tæt på trinkanten på de mest krævende trapper. [Kilde: Bespoke Stairlifts – fremstilling af Infinity](#)

Vurdering: Alle tre systemer kan fremstilles til kurvede trapper. Flow X har den tydeligst dokumenterede fordel på meget smalle og stejle trapper. Infinity har en individuelt CAD-projekteret skinne, mens Stannahs løsning normalt kræver lidt mere plads.

Hvilken stolelift skal man vælge?

Der findes ikke én stolelift, som er bedst for alle.

Flow X fremstår samlet som den mest komplette løsning, når der lægges særlig vægt på kompakt skinneføring, automatisk sæderotation, ergonomisk støtte, seleovervågning og mulighed for nød-sænkning. Den er især interessant på smalle, stejle eller komplicerede trapper. Begrænsningen er blandt andet en maksimal brugervægt på 125 kg og færre dokumenterede specialseler end hos Stannah.

Stannah Siena fremstår som den stærkeste løsning til omfattende individuel brugertilpasning. De forskellige sædebredder, seletyper og kontrolformer er relevante ved komplekse motoriske eller posturale behov. Til gengæld kan den kurvede skinneløsning optage mere plads, og nødprocedurerne giver ikke samme direkte mulighed for brugerstyret nød-sænkning som Flow X.

Bespoke Infinity er en enkel og individuelt fremstillet kurvelift med sikkerhedssensorer, diagnostikdisplay og mulighed for elektrisk drejesæde. Den kan være en god løsning til en bruger med mere almindelige mobilitetsbehov. Det

offentlige producentmateriale dokumenterer dog færre muligheder for specialtilpasning og selvredning end materialet for de to øvrige produkter.

Den endelige vurdering skal ske i hjemmet

En produktoversigt kan ikke erstatte en konkret vurdering. Før valg af stolelift bør leverandøren undersøge:

- brugerens højde, vægt og benlængde
- balance, siddestabilitet og evne til at rejse og sætte sig
- håndfunktion og evne til at betjene kontakt og sele
- eventuelle ufrivillige bevægelser eller ensidig lammelse
- behov for ganghjælpemiddel på begge etager
- trappens bredde, hældning, sving, døre og frie passage
- den konkrete procedure ved strøm- og driftstop
- lokal service, responstid og adgang til reservedele

Den bedste stolelift er derfor ikke nødvendigvis den med flest funktioner. Det er den løsning, hvor bruger, sæde, betjening, sikkerhedsudstyr, skinne og serviceberedskab fungerer som én samlet helhed.

Forhandlere på det danske marked

- **Swing-X (producentnavn Flow X):** [Stigus Elevator ApS](#)
- **Stannah Siena:** [A/S A.P. Botved](#)
- **Bespoke Infinity:** [Jøhl Human Care ApS](#)

Forhandleroplysningerne er kontrolleret den 19. juli 2026. Bespoke-produktets danske leverandørrelation fremgår desuden af [Hjælpemiddelbasen](#).

Kildegrundlag

Analysen bygger på følgende offentligt tilgængelige hovedkilder:

1. [Access BDD: Flow X – produktbeskrivelse og tekniske specifikationer](#)
2. [Access BDD: Features and benefits of the Flow X stairlift](#)
3. [Stannah: Siena – produktbeskrivelse](#)
4. [Stannah: Siena-brochure til kurvede trapper](#)
5. [Stannah: Brugervejledning til Siena 260](#)
6. [Bespoke Stairlifts: Infinity Curved](#)
7. [Bespoke Stairlifts: Tilvalg](#)
8. [Bespoke Stairlifts: Fremstilling og CAD-projektering af Infinity](#)
9. [Bespoke Stairlifts: Brugervejledning til Infinity](#)
10. [A/S A.P. Botved: Siena på det danske marked](#)
11. [Hjælpemiddelbasen: Bespoke-stolelift og dansk leverandør](#)